

Influenza A&B Rapid Card

인플루엔자 검사의 **토탈 솔루션**을 제공합니다.



신속한 결과
3분 이내, 최장 8분



탁월한 민감도·특이도
95% 이상, 여러 변종 진단



쉽고 편리한 검사
3단계 검사, 연질 튜브 사용




확 달라진 편의성, 성능 업그레이드

BioTracer™

Influenza A&B Rapid Card

Influenza A&B Rapid Card는 면역크로마토그래피법을 이용하여 손쉽게 인플루엔자 Type A와 Type B를 검사하는 키트 제품입니다.

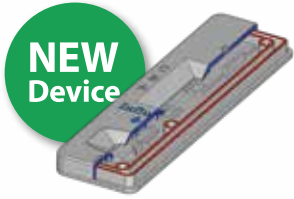

디바이스 개선
전개 개선, 누수 방지




3방울 점적
빠른 점적, 빠른 결과 판독




연질 튜브 도입
부드러운 샘플링, 사용성 증가


검사방법

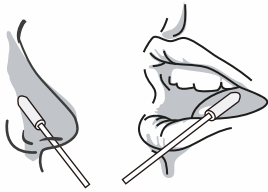


STEP 01
스왑을 사용하여 코 또는 인후 분비물을 추출합니다.

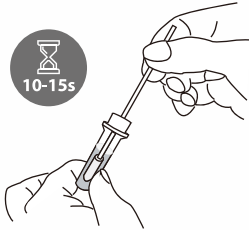

STEP 02
스왑 검체를 검체 추출액 튜브에 넣고 충분히 돌려줍니다.

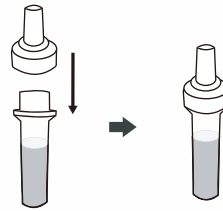


STEP 03
검체 추출액이 담긴 튜브에 필터 캡을 씌웁니다.

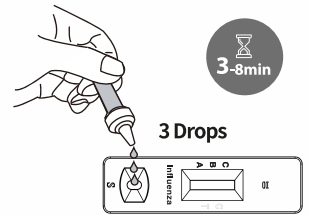

STEP 04
검체 점적 부위에 3방울을 떨어뜨린 후 결과를 판독 합니다.

결과 판독

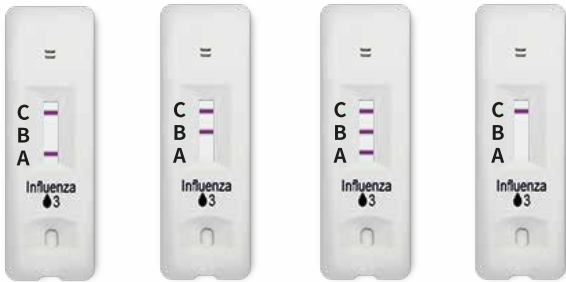


A형 양성 B형 양성 A/B형 양성 음성



무효 (재검사 필요) - 컨트롤 라인이 발색되지 않은 경우

탁월한 민감도 · 특이도

비강 스왑액	바이러스 분리 배양법			Total
	A형 양성	B형 양성	음성	
A형 양성	97	-	5	102
B형 양성	-	94	4	98
음성	-	-	200	200
합계	97	94	209	400

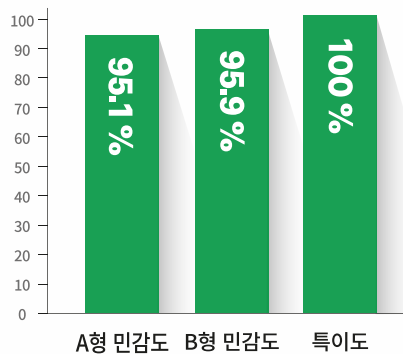

제품정보

주문 번호	제품명	제품구성	포장단위	보관온도	사용기한
11311	BioTracer™ Influenza A&B Rapid Card	디바이스, 검체 추출액 튜브, 필터 캡, 검체 채취용 스왑	20 test/kit	2-30 °C	24개월